

# Accuvac

- Entriegelung und Entnahme aus der Wandhalterung
- Zubehör vorhanden? (2+2 Absaugkatheter, Yankauer- Katheter, Adapter für Vakuummatratze)
- Einwegbehältersystem, Wechsel
- Absaugschlauch mit Fingertig und A-Katheter oder Yankauer-Katheter
- Vorsicht bei falschem Anschluss der Schläuche (Gerätedefekt)

## Pro

- Tasten, Anzeigen
- blinken = eingestelltes Vakuum, leuchten = erreichtes Vakuum
- Einschalten kurz drücken, ausschalten lang drücken
- Funktionskontrolle:
  - Zubehör?
  - Beschädigungen?
  - Ladekontrolleuchte leuchtet?
  - aus der Halterung nehmen
  - Fingertipp verschließen
  - Testtaste 3s halten, Akkuanzeige, Piepton, 3 grüne LEDs und 1 piepton = OK, 2 Töne und eine oder mehrere rote LED = nicht bestanden
  - Anleitung im Info-Arciv unter „Accuvac\_Pro\_Lite“ zu finden

## Rescue

- Tasten, Anzeigen
- blinken = eingestelltes Vakuum, leuchten = erreichtes Vakuum
- Einschalten kurz drücken, ausschalten lang drücken
- Funktionskontrolle:
  - Zubehör?
  - Beschädigungen?
  - Ladekontrolleuchte leuchtet?
  - aus der Halterung nehmen
  - Fingertipp verrschließen
  - Einschalten -0,8Bar anwählen, Vakkum muss innerhalb von 20sec. aufgebaut sein
  - Fingertipp öffnen (Pumpe läuft wieder an)
  - -0,3Bar anwählen, Fingertipp verschließen
  - Pumpe stoppt
  - -0,2Bar anwählen
  - Pumpe darf 10s nicht anlaufen
  - Pumpe ausschalten
- Anleitung ist im Info-Arciv unter „Accuvac“ zu finden

Last update: 2023/12/17 12:16 praxisanleiter:einweisungen:accuvac <https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:accuvac&rev=1702811768>

From: <https://www.rdbuch.lima-city.de/> - Wiki

Permanent link: <https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:accuvac&rev=1702811768>

Last update: **2023/12/17 12:16**

