

Accuvac

- Entriegelung und Entnahme aus der Wandhalterung
- Zubehör vorhanden? (2+2 Absaugkatheter, Yankauer- Katheter, Adapter für Vakuummatratze)
- Einwegbehältersystem, Wechsel
- Absaugschlauch mit Fingertip und A-Katheter oder Yankauer-Katheter
- Vorsicht bei falschem Anschluss der Schläuche (Gerätedefekt)

Pro

- Tasten, Anzeigen
- blinken = eingestelltes Vakuum, leuchten = erreichtes Vakuum
- Einschalten kurz drücken, ausschalten lang drücken
- Funktionskontrolle:
 - Zubehör?
 - Beschädigungen?
 - Ladekontrolleuchte leuchtet?
 - aus der Halterung nehmen
 - Fingertipp verschließen
 - Testtaste 3s halten, Akkuanzeige, Piepton, 3 grüne LEDs und 1 piepton = OK, 2 Töne und eine oder mehrere rote LED = nicht bestanden
 - Anleitung im Info-Arciv unter „Accuvac_Pro_Lite“ zu finden

Rescue

- Tasten, Anzeigen
- blinken = eingestelltes Vakuum, leuchten = erreichtes Vakuum
- Einschalten kurz drücken, ausschalten lang drücken
- Funktionskontrolle:
 - Zubehör?
 - Beschädigungen?
 - Ladekontrolleuchte leuchtet?
 - aus der Halterung nehmen
 - Fingertipp verrschließen
 - Einschalten -0,8Bar anwählen, Vakkum muss innerhalb von 20sec. aufgebaut sein
 - Fingertipp öffnen (Pumpe läuft wieder an)
 - -0,3Bar anwählen, Fingertipp verschließen
 - Pumpe stoppt
 - -0,2Bar anwählen
 - Pumpe darf 10s nicht anlaufen
 - Pumpe ausschalten
- Anleitung ist im Info-Arciv unter „Accuvac“ zu finden

Last update: 2023/12/17 12:16 praxisanleiter:einweisungen:accuvac <https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:accuvac&rev=1702811768>

From:
<https://www.rdbuch.lima-city.de/> - **Wiki**

Permanent link:
<https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:accuvac&rev=1702811768>

Last update: **2023/12/17 12:16**

