

# C3 Erweiterte Funktionen

## • **Schrittmacher / Pacer**

- Demand + Fix bei Bradykardie, Overdrive bei Tachykardie
- Elektrodenposition A/P (wenn Zustand nach Rea kann die auch bleiben)
- Demand = Pat-Frequenz wird auf eingestellte Frequenz angehoben
- Fix = es wird stumpf die eingestellte Frequenz gemacht
- OVR/Overdrive = F muss >80/min sein, F anfangs größer als Pat-Frequenz, dann langsam senken, „Stim“ zeigt Stimulation an, Analgosedierung! (Youtube: Kardioversion tut weh)

## • **NIBD während AED-Modus**

- Dreh-Drück-Rad drücken
- NIBD → Start

## • **IBD**

- Ansicht → IBD
- Zwischenkabel → P1 (Tasche nicht zumachen!)
- Transducer / Druckdome an Zwischenkabel
- Sensor auf Herzhöhe
- Kalibrierung:
  - 3-Wege-Hahn zum Pat schließen
  - Deckel entfernen
  - Kurve P1 aufrufen → Kalibrierung
  - Hauptmenü → IBD → Kalibrierung P1
  - warten bis -1/ -2 / 0 im Display
  - Kappe drauf
  - 3-Wege-Hahn zum Pat öffnen
  - Spülen

C

From:  
<https://www.rdbuch.lima-city.de/> - Wiki

Permanent link:  
[https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:c3\\_erweiterte\\_funktionen&rev=1714056779](https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:c3_erweiterte_funktionen&rev=1714056779)

Last update: 2024/04/25 16:52

