

C3 Erweiterte Funktionen

• **Schrittmacher / Pacer**

- Demand + Fix bei Bradykardie, Overdrive bei Tachykardie
- Elektrodenposition A/P (wenn Zustand nach Rea kann die auch bleiben)
- Demand = Pat-Frequenz wird auf eingestellte Frequenz angehoben
- Fix = es wird stumpf die eingestellte Frequenz gemacht
- OVR/Overdrive = F muss >80/min sein, F anfangs größer als Pat-Frequenz, dann langsam senken, „Stim“ zeigt Stimulation an, Analgosedierung! (Youtube: Kardioversion tut weh)

• **NIBD während AED-Modus**

- Dreh-Drück-Rad drücken
- NIBD → Start

• **IBD**

- Ansicht → IBD
- Zwischenkabel → P1 (Tasche nicht zumachen!)
- Transducer / Druckdome an Zwischenkabel
- Sensor auf Herzhöhe
- Kalibrierung:
 - 3-Wege-Hahn zum Pat schließen
 - Deckel entfernen
 - Kurve P1 aufrufen → Kalibrierung
 - Hauptmenü → IBD → Kalibrierung P1
 - warten bis -1/ -2 / 0 im Display
 - Kappe drauf
 - 3-Wege-Hahn zum Pat öffnen
 - Spülen

C

From:
<https://www.rdbuch.lima-city.de/> - Wiki

Permanent link:
https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:c3_erweiterte_funktionen&rev=1714056779

Last update: 2024/04/25 16:52

