

# CPR Stollenwerk

- Entnahme / Ausfahren Schlitten
- Querverschiebung
- Absenkung Luftfeder
- Ersatzakku und Akkutausch
  
- Beleuchtung / Blaulicht
- Anbauteile / Defihalter (nicht Fahrt) / P-Box-Halterung (Fahrt ja)
- Ausziehbare Griffe (einrasten)
- Bremsen / Lenkrollen (blockieren vor dem Einladen und dem Baladen mit Patienten!)
- Fußteil absenken (max. 40° beim Einladen) und ausziehen (Kontaktleiste), keine Sitzgelegenheit!
- Bauchdeckenentlastung
- Fußbügel (Sicherheitsrelevant)
- Kopfteil Verstellen und Ausziehen
- Seitenbegrenzungen (nicht zum ziehen, heben, umlagern)
- Ober - / Unterteil trennen, Pat-Transport auch ohne Fahrgerät möglich
- Polsterentfernung zwecks Reinigung
- Erwachsenen-Gurtsystem (ab 25 kg / 145 cm), Mittelverstellung immer klein!
- Montage Kindersicherung (3,4 kg bis 32 kg, richtige Bolzen beachten)
- Bedienungsanleitung lesen (M:\37-Alle\37-3-1\_KStaffel\CPS System Stollenwerk)

## Notbetrieb

- FZ-Schlitten ist passiv
- Ausfall Trage im FZ
- Ausfall Trage außerhalb FZ

?

From:  
<https://www.rdbuch.lima-city.de/> - Wiki

Permanent link:  
[https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:cpr\\_stollenwerk&rev=1714056859](https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:cpr_stollenwerk&rev=1714056859)

Last update: **2024/04/25 16:54**

