

Hamilton T1

Fix Me!

- App und Bedienungsanleitung
- Anschlüsse
- Anschluss des Schlauches. Membrane beachten
- Anschluss Vernebler (braucht O2)
- Tests: Dichtheit und Flow-Sensor
- O2-Sensor bitte nicht Kalibrieren, kalibriert sich selber oder fordert dies an
- Schlauch ab 3 kg Pat-Gewicht geeignet, Torraum durch Gänsegurgel und Filter groß
- Akkulaufzeit 4h / Akku, wir haben nur 1 Akku, Gerät immer an den Strom !
- Modis
- Volumenkontrolliert 3x: VS = Volumensupport
- NIV/ST = mit Sicherheitsfrequenz
- CPR = Alarmer aus, Uhrzeit läuft,
- Parameter, 3 wichtigste am Rand, Taste für alle
- Alarmer: blauer Strich gleich Hinweisgrenze das grenze fast erreicht, startet immer in Lautstärke 5, kann reduziert werden
- Ereignisse
- Tools
- Kurven
- Tasten: Tastensperre, zus. Atemhub, Präoxigenieren, Screenshot, Vernebelung, Alarm aus 2min,
- ASV: automatische Einstellung, Grafik einblenden

ITW

From:
<https://www.rdbuch.lima-city.de/> - Wiki

Permanent link:
https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:hamilton_t1

Last update: **2025/03/26 17:46**

