

# Oxylog VE300

- Modelle
  - NEF + RTW: Plusversion → Einwegschlauchsystem (2 Messleitungen)
- Stromversorgung im Fz, Dauerladen OK, max 14 Tage ohne Laden
- O2-Umschalter eingebaut, bei ext. Versorgung kl. Flasche zudrehen da höherer Druck Priorität hat
- Flaschenwechsel, O2 Nippel beachten
- Einschalten → 3-Schritt-Bedienung
  - Kind/Erwachsen
  - Beatmungsform
    - VC (wie Oxylog1000)
    - CPAP
    - Rea-Modus
    - BIPAP
  - Beatmung starten
- Türkies = Wert / Einstellung veränderbar
- Alarme: blau, gelb, rot
- Alarmeinstellungen
- weitere Einstellungen (%O2 etc.)
- Blaue Statusleister
  - Infos
  - X → zurück
  - III- taste → zurück
- Anzeigeumschaltung Beatmungsdruck, Druckkurve, Flowkurve
- Taste zum Wenden des Displays
- Beatmung pausieren (Einstellungen bleiben erhalten): grüne Taste, Standby und Bestätigen
- Wechsel der Beatmungsform = Verlust der Einstellungen
- Hauptmenü → oben Rechts um auf Einstellungen zu gelangen (Helligkeit, Lautstärke, Mehrweg/Einweg-Schlauch, Logbuch, QR-Code (Bedienungsanleitung), Test/ Kalibrierung
- Test: tgl. ohne Schlauch, vor dem Einsatz mit
- Umschaltung Einweg-/Mehrwegschlauch
- Ausschalten
- Beatmungsformen:
  - VC: Volumenkontrolliert
  - PC: Druckkontrolliert, BIPAP, Lungenschonender
  - CPAP
    - PS zuschaltbar, dann Trigger und Rampe auswählbar, Erweitert: Apnoe-Beatmung auswählbar (diese muss manuell wieder beendet werden)
  - CPR: wie VC jedoch ohne PEEP, ohne Alarme, Beatmung wird zwischen den Thoraxkompressionen durchgeführt

B

From:  
<https://www.rdbuch.lima-city.de/> - **Wiki**

Permanent link:  
[https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:oxylog\\_ve300](https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:oxylog_ve300)

Last update: **2024/07/11 08:34**

