

Perfusor/ Spritzenpumpe Braun Compact Plus

- Feste Polklemme,
 - montierter an Trage oder Gerätewand
 - muss während der Fahrt an die Wand
- Verbinden von 2 oder mehr Geräten möglich, jedoch einzelne Sicherung mittels Polklemme notwendig
- Akkulaufzeit größer 8h, Akku darf ständig geladen werden (230V Kaltgerätesteckdose)
- Selbsttest beim Einschalten = täglicher Test + Beschädigungen? + Strom dran?
- Interner Speicher für Ereignisse
- Tasten (Ein/Aus, Menü, Bolus, Start/Stop, Pfeile+OK, Info, Zurück)
- Einschalten
 - Bügel 1
 - Bügel 2
 - Spritze auswählen und OK (ggf. Flussrate)
 - Start
- Spritze einlegen
- Anzeigen
 - läuft
 - Druck
- Flussrate kann im laufenden Betrieb geändert werden
- 3s EIN-Taster
 - Ausschalten, wenn keine Spritze drin
 - Standby, wenn Spritze eingelegt
- Bolus:
 - BOL und BOL halten, alle 2ml neu drücken
 - BOL und Volumen eingeben
- Desinfektion nebelfeucht
- Sturz = zur Medizintechnik, auch nach VU
- Bedienungsanleitung lesen ist Pflicht

Zubehör

- Perfusorset
- Tasche Aterenol (Herrichtung Arterenolperfusor)

Übungen

- Spritzenwechsel bei 2 Arterenol-Perfusoren
- Bolusgaben
- bestimmte Volumen oder Dosierungen geben (mg/ml) z.B. für Kinder
- Medikamente aufziehen (z.B. Arterenaol 100müg/ml)
 - 1mg Arterenol auf 50ml → 20müg/ml
 - 5mg Arterenol auf 50ml → 100müg/ml

- Änderung der Flussraten

Allgemein

- spritzenpumpe.pdf

Sonstiges

From:
<https://www.rdbuch.lima-city.de/> - Wiki

Permanent link:
https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:perfusor_compact_plus

Last update: **2024/12/29 15:15**

