

# Perfusor/ Spritzenpumpe Braun Compact Plus

- Feste Polklemme,
  - montierter an Trage oder Gerätewand
  - muss während der Fahrt an die Wand
- Verbinden von 2 oder mehr Geräten möglich, jedoch einzelne Sicherung mittels Polklemme notwendig
- Akkulaufzeit größer 8h, Akku darf ständig geladen werden (230V Kaltgerätesteckdose)
- Selbsttest beim Einschalten = täglicher Test + Beschädigungen? + Strom dran?
- Interner Speicher für Ereignisse
- Tasten (Ein/Aus, Menü, Bolus, Start/Stop, Pfeile+OK, Info, Zurück)
- Einschalten
  - Bügel 1
  - Bügel 2
  - Spritze auswählen und OK (ggf. Flussrate)
  - Start
- Spritze einlegen
- Anzeigen
  - läuft
  - Druck
- Flussrate kann im laufenden Betrieb geändert werden
- 3s EIN-Taster
  - Ausschalten, wenn keine Spritze drin
  - Standby, wenn Spritze eingelegt
- Bolus:
  - BOL und BOL halten, alle 2ml neu drücken
  - BOL und Volumen eingeben
- Desinfektion nebelfeucht
- Sturz = zur Medizintechnik, auch nach VU
- Bedienungsanleitung lesen ist Pflicht

## Zubehör

- Perfusorset
- Tasche Aterenol (Herrichtung Arterienolperfusor)

## Allgemein

- spritzenpumpe.pdf

From:  
<https://www.rdbuch.lima-city.de/> - Wiki

Permanent link:  
[https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:perfusor\\_compact\\_plus&rev=1702916886](https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:perfusor_compact_plus&rev=1702916886)

Last update: **2023/12/18 17:28**

