

Perfusor/ Spritzenpumpe Braun Compact Plus

- Feste Polklemme,
 - montierter an Trage oder Gerätewand
 - muss während der Fahrt an die Wand
- Verbinden von 2 oder mehr Geräten möglich, jedoch einzelne Sicherung mittels Polklemme notwendig
- Akkulaufzeit größer 8h, Akku darf ständig geladen werden (230V Kaltgerätesteckdose)
- Selbsttest beim Einschalten = täglicher Test + Beschädigungen? + Strom dran?
- Interner Speicher für Ereignisse
- Tasten (Ein/Aus, Menü, Bolus, Start/Stop, Pfeile+OK, Info, Zurück)
- Einschalten
 - Bügel 1
 - Bügel 2
 - Spritze auswählen und OK (ggf. Flussrate)
 - Start
- Spritze einlegen
- Anzeigen
 - läuft
 - Druck
- Flussrate kann im laufenden Betrieb geändert werden
- 3s EIN-Taster
 - Ausschalten, wenn keine Spritze drin
 - Standby, wenn Spritze eingelegt
- Bolus:
 - BOL und BOL halten, alle 2ml neu drücken
 - BOL und Volumen eingeben
- Desinfektion nebelfeucht
- Sturz = zur Medizintechnik, auch nach VU
- Bedienungsanleitung lesen ist Pflicht

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
Zubehör

- Perfusorset
- Tasche Aterenol (Herrichtung Arterenolperfusor)

Allgemein

- spritzenpumpe.pdf

Sonstiges



From:
<https://www.rdbuch.lima-city.de/> - Wiki

Permanent link:
https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:perfusor_compact_plus&rev=1715438054

Last update: **2024/05/11 16:34**

