

Stryker Power Pro 2

- rote Teile sind bedienbar und anfassbar
- roter Hebel zum Entriegeln des Tragetisches
- Gewichtszuladung 318kg (Problem eher der Umfang als das Gewicht)
- Bedienung + - und kl.Kreis
- Tragetischarm rein bis gelbe Markierung (zum Schließen der FZ-Türe), zum Fahren ganz bis vorne!
- Bedienung
 - Kopfteil
 - Fußteil (Schocklage und Bachdeckenentlastung)
 - Kopfteil einkürzbar
 - Fußteil einkürz- und verlängerter
 - XPS (Abklappen und Nutzung zum Umlagern)
 - Griff am Fußteil
 - Bremse der Rollen, 360Grad- Drehfunktion! R und L getrennt
- Gerätehaken am Kopfteil (nicht während der Fahrt)
- Anschnall-Gurte über Kreuz!! Und immer alle nutzen
- Licht
- kein eigenständiges schmieren! Zerstörung der Trage, Tragenwerkstatt hat spezielles Schmiermittel
- Akku wird induktiv geladen, soll 1x wöchentlich mit Reserveakku getauscht werden
- tgl. Test: Trage raus und rein, achten auf Beschädigungen, Oil ?
- Notbedienung
 - Trage fällt aus (Notentriegelungshebel Trage)
 - Tragetisch fällt aus (Taste auf/ab sowie ablassen an Bedieneinheit, beim Einschieben er/li testen ob Trage beidseitig eingerastet)
 - beides fällt aus (3 Helfer notwendig)

x A B C D E

From:
<https://www.rdbuch.lima-city.de/> - Wiki

Permanent link:
https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:stryker_powerpro2&rev=1737059825

Last update: **2025/01/16 21:37**

